

TOBILLERA AJUSTABLE



Diseñada para reforzar y dar soporte a tobillos tensos, débiles o lesionados

Calificación: Sin calificación

Precio

10,95 €

10,95 €

1,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

DESCRIPCIÓN

Diseñada para reforzar y dar soporte a tobillos tensos, débiles o lesionados. También previene de posibles lesiones.

Diseño para la colocación adecuada a través del talón.

Correa ajustable para una fijación ideal.

Materiales duraderos y confortables.

Utilizable en el tobillo derecho e izquierdo, lavable y reutilizable.

75% neoprene blend, 25% polyester.

MODO DE EMPLEO

1. Adaptar el talón al bucle dejando la superficie lisa en contacto con la piel. Rodear la articulación de fuera a dentro del tobillo con el resto de la tobillera.
2. Rodear el empeine y girar por la planta del pie.
3. Envolver el soporte por detrás del tobillo, y luego hacia la parte delantera. Sujetar el velcro al soporte. Última adaptación del soporte a la articulación de modo confortable.

Consulte con su médico en caso de duda.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.